

ISevo

精液充填機

I sevo

— アイセボ —



安心、安全の追求。



自動検知と目視確認によるダブルの安心感

アイセボの精液充填封入工程では、アルファストローの綿栓の水分量を自動的に感知することにより、充填不足のストロー作成を未然に防ぎます。また、充填の様子を外部のスクリーンに表示することにより、離れたところからも目視確認をすることが可能です。



時間の節約

アイセボには、クイックスタート、高速充填（4×4サイクルで12,500ストロー/時）、高い洗浄性といった特徴があります。また、オペレーターは充填中、目視している必要がないので、時間を有効活用できます。



効率的な充填封入

アルファストローは、綿栓部の一部が半硬質ロッドでできているため、精液吸収率が低く、精液を無駄にしません。また、アイセボは様々なモデルを取り揃えているため、充填封入工程の最初から最後まで最適な生産が可能です。アルファストローと一緒に使用することで、当社取り扱い従来品使用時と比べて5%多く※生産することができます。

※アルファストロー（0.25ml）使用時



使いやすい構造・設計


3つの操作ボタンを使用した簡単操作で、快適性と操作スピードを改善します。流線形フレームと簡単に分解可能な構造により、高い洗浄性を実現しています。充填針はディスプレイザブルのため衛生的で、精液充填量の安定性が向上しています。



独自のトレーサビリティ機能

アイセボは、独自のトレーサビリティ機能を備えています。全ての工程を記録し、レポートを編集できます。オプションのバーコードシステムを導入することで、ストローに印字されたバーコードから、充填されている雄牛の精子を確認することができます。

技術と知性の融合で ストロー精液充填機 の概念を変える。

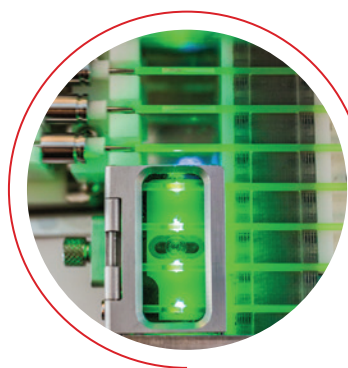

綿栓の水分レベルを自動確認。
綿栓が安全レベルまで
満たされていない場合、
機械は停止します
(アルファモード対応機のみ)。

ホッパーと充填ステーションの距離が短く
クイックスタート可能。

タッチスクリーンで1×1、2×2、4×4に変更可能。
4本から1本へは自動変更、精液を無駄にしない特徴を徹底。

USBカメラにより遠隔での確認が可能。

3つのボタンで簡単操作。
生産性を向上。

充填ニードルはディスポーザブルで、
素早く交換が可能。衛生的で正確。

充填封入ストローカウンター

ISevo 仕様

コンパクト > 標準モデル: 520L × 350H × 570D mm, 40 kg
> インテグレートモデル: 700L × 350H × 570D mm, 52 kg

省電力 > 本体: 115-230V 50/60Hz 24Vdc

静音性 > 80 デシベル以下

用途に合わせた多彩なモデル

- アイセボ(標準モデル: 通常ストロー、アルファストロー使用可、アルファモード無)
- アイセボアルファ(アルファモデル: アルファストロー専用機、アルファモード有)
- アイセボアルファフレックス(フレックスモデル: 通常ストロー、アルファストロー使用可、アルファモード有)

ストロー充填封入モード

- ・ 4×4(最大12,500本/時)
- ・ 2×2
- ・ 1×1
- ・ 精液切れ検知と1×1への自動スイッチ
- ・ 1×1, 2×2へのダイナミックスイッチ
- ・ アルファモード、標準モードへのダイナミックスイッチ

接続、洗浄、メンテナンス

- ・ チームビューアによるリモートメンテナンス
- ・ メインパーツの取り外しは工具不要。洗浄が簡単。

オプション

【スーパービジョンソフトウェア】
・ タッチスクリーンPC、専用ソフトウェア

【コンシステンシーチェックソフトウェア】
・ タッチスクリーンPC、専用ソフトウェア、バーコードリーダー、ラベルプリンター

